



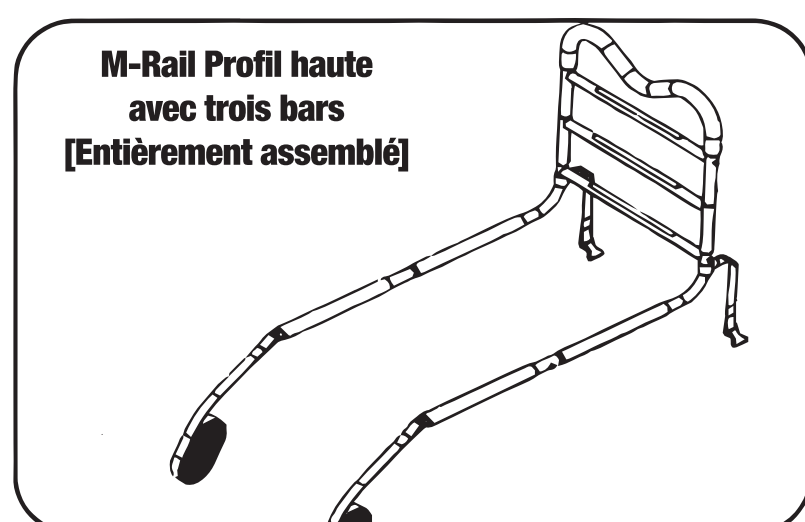

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS



- Veuillez lire ces instructions attentivement avant l'installation et l'utilisation du M-Rail
- Veuillez lire les étiquettes d'avertissement des pièces du M-rail.
- Le M-Rail est un dispositif de rampe de chevet auxiliaire pour lits.
 - o Il est utilisé pour assister les personnes mobiles mais requérant une aide quelconque pour bouger ou s'asseoir dans le lit
 - o l aide aussi avec l'équilibre lorsque la personne entre ou sort du lit.
 - o Il aide en plus la personne avec l'équilibre lorsqu'elle se tient à côté du lit ou au cours d'un déplacement près du lit.
- Le M-Rail n'est pas destiné pour supporter le plein poids d'une personne mais est approprié pour les gens qui pèsent jusqu'à 300 livres (135 kg).
- Les lits étroits peuvent basculer si tout le poids d'une personne est utilisé.
- Approprié pour tous les types de lits domestiques avec sommiers à ressorts.
- Peut-être utilisé avec quelques types de lits de soins, style institutionnel et d'hôpital réglables.

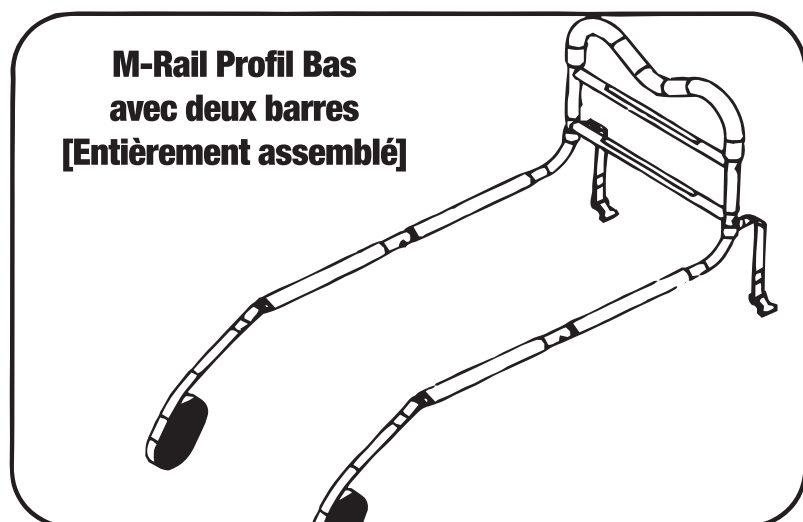

Il est très important que le M-Rail ne soit pas attaché à aucune partie de lits de soins, style institutionnel ou d'hôpital qui peuvent être déplacés ou ajustés et que les courroies d'attachement ne touchent aucune section du lit qui bouge.

AVERTISSEMENT: SE PRENDRE AU PIÈGE ENTRE UN DISPOSITIF DE RAMPE DE CHEVET AUXILIAIRE ET UN MATELAS PEUT ÊTRE SÉRIEUX ET POTENTIELLEMENT MORTEL.

- Le piégeage peut survenir lorsqu'il y a un espace entre le côté du lit et le dispositif de rampe de chevet auxiliaire.
- Il est possible qu'une partie du corps d'une personne tel que la tête, le cou, un bras, une jambe ou le corps se prenne entre le côté du matelas et la barre horizontale ou verticale du dispositif de rampe auxiliaire.
- Le matelas doit être bien collé contre la rampe auxiliaire, avec aucun espacement en aucun moment. Ceci devrait être vérifié souvent – au moins quotidiennement.
- Pour une sécurité accrue nous recommandons l'installation de deux rampes auxiliaires M-Rails, une de chaque côté du lit, pour aider à garder le matelas en place avec aucun écarts.
- Les barres horizontales doivent être utilisées en tout temps.

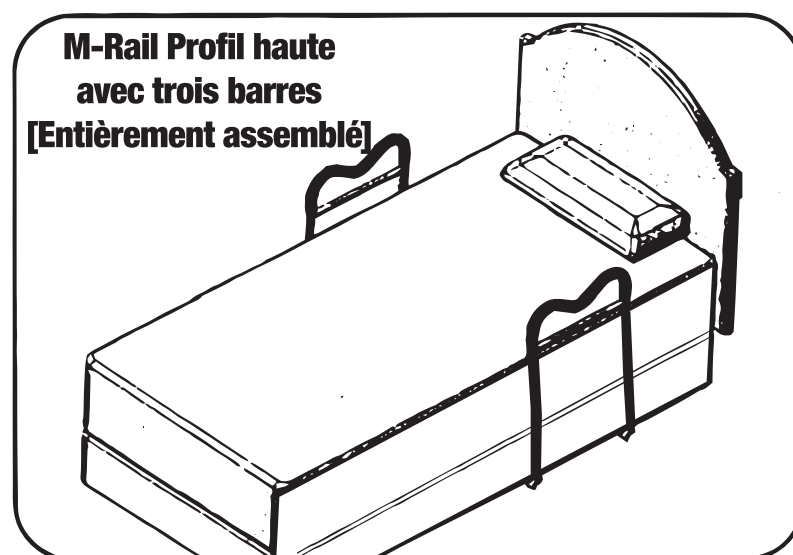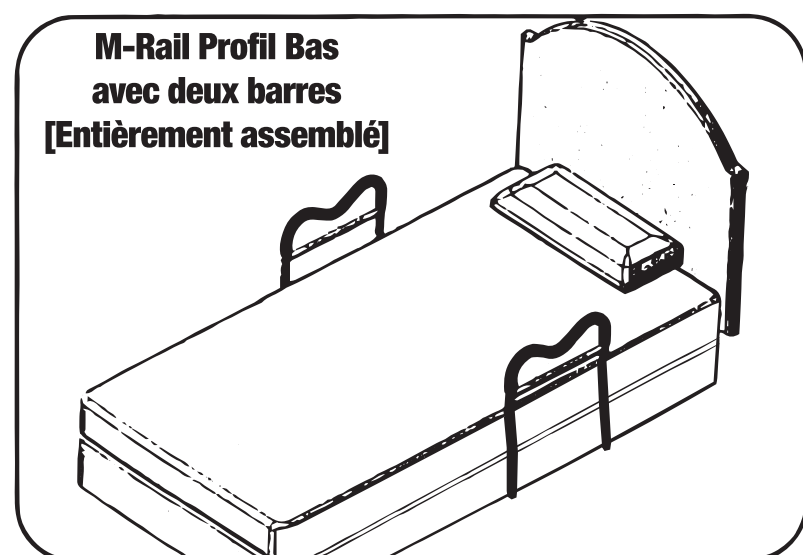


PRUDENCE: Si la base du lit est plus large que le matelas, deux rampes auxiliaires M-Rail ne fonctionneront pas.

- La rampe auxiliaire M-Rail n'est PAS conçue pour les gens ayant des difficultés de mobilité, ou pour les personnes alitées de manière permanente. Des mesures de sécurité et précautions extrêmes devraient être utilisées avec des patients à risque plus élevés.
- Le M-Rail NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME MÉTHODE DE CONTRAINTE et ne doit PAS ÊTRE UTILISÉ POUR EMPÊCHER DES PATIENTS DE TOMBER DU LIT.
- Veuillez lire ces liens suivants:
 - o <http://www.fda.gov/cdrh/bedrails.html>
 - o http://www.fda.gov/cdrh/beds/bed_brochure.html


Préparer l'assemblage du M-Rail:

1. Ouvrez la boîte et y sortir toutes les pièces. Enlevez les emballages plastiques et disposez de ceux-ci de manière sécuritaire hors de la portée des enfants et bébés.
2. Le M-Rail peut être utilisé soit avec deux (2) barres horizontales ou trois (3) barres horizontales. Vous pourrez ajuster la hauteur du M-Rail à partir du sol en choisissant soit l'option de deux (2) ou trois (3) barres horizontales. Si vous choisissez 2 barres horizontales, veuillez disposer de la pièce D (Barre H).

Assemblage de la M-Rail:


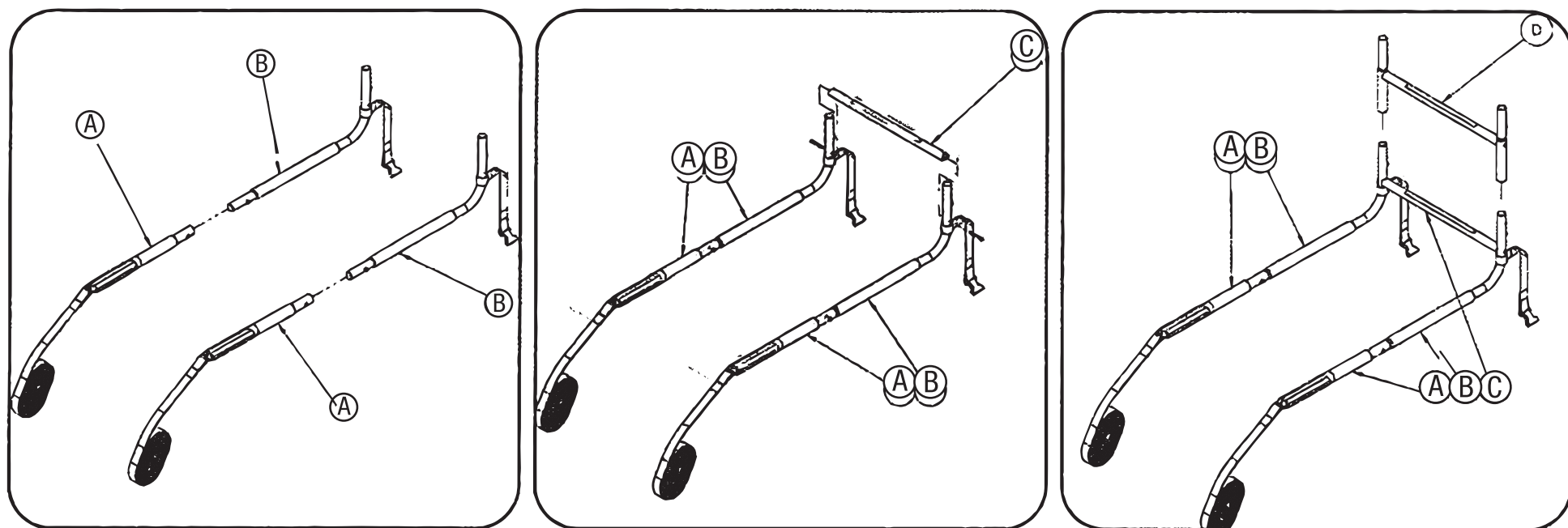


3. Enclenchez la pièce A dans la pièce B. Répétez de l'autre côté.
4. Vissez la pièce C dans la pièce B. Laissez les vis non serrées
5. Si vous utilisez la pièce D (Barre H) , enclenchez la pièce D dans la pièce B.

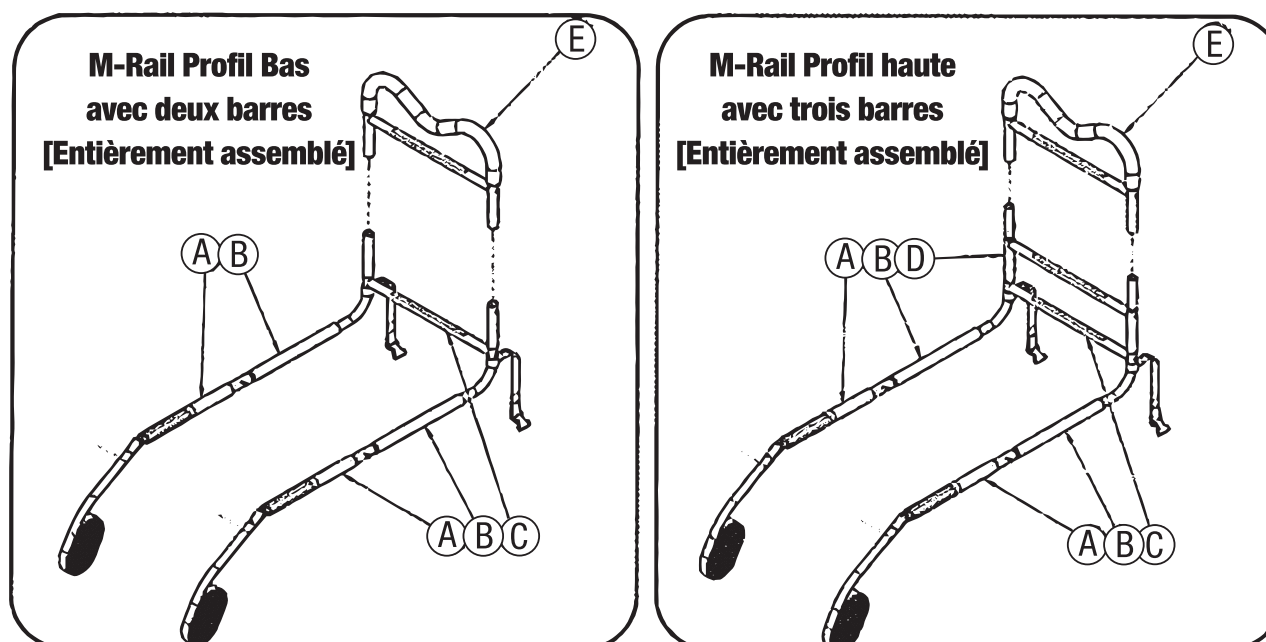

6. Finalement, enclenchez la pièce E soit dans la pièce D ou B. Assurez-vous que tous les boutons d'enclenchement à ressort soient en place.



Conseil rapide d'installation: si vous utilisez la pièce D et que vous éprouvez des difficultés lorsque vous enclenchez la pièce E à la pièce D, desserrez les vis 121 de la pièce D en utilisant la clé allen fournie.

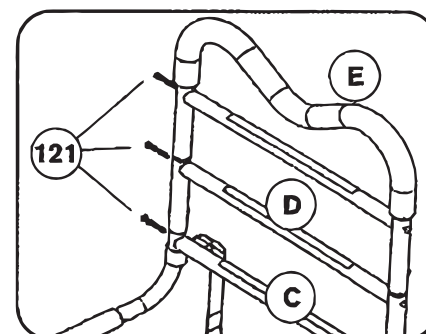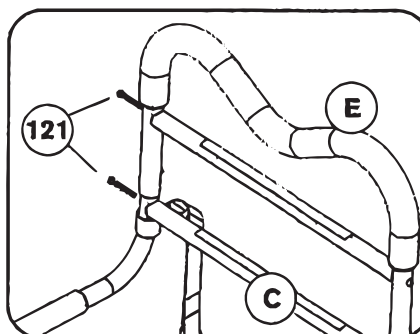



7. Des ajustements pourraient être nécessaires pour serrer ou desserrer la pièce D (barre H) pour un ajustement approprié. Vous êtes prêt(e) à installer le M-Rail sur votre lit.

Installation du M-Rail assemblé sur le lit:



Conseil rapide d'installation: L'installation sera plus facile si vous enlevez le matelas.

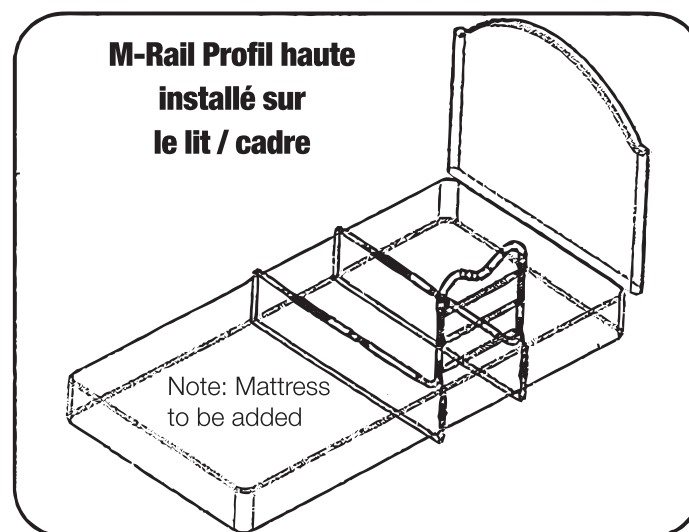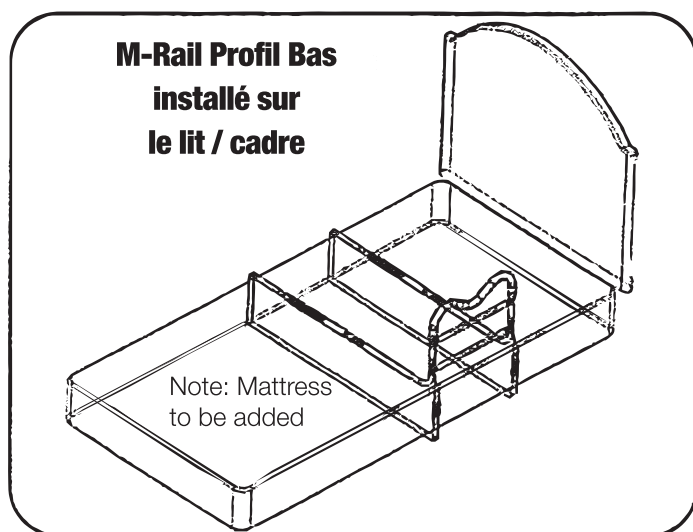

8. Faites glisser le M-Rail assemblé entre le matelas et la base du lit ou le cadre de support du lit.

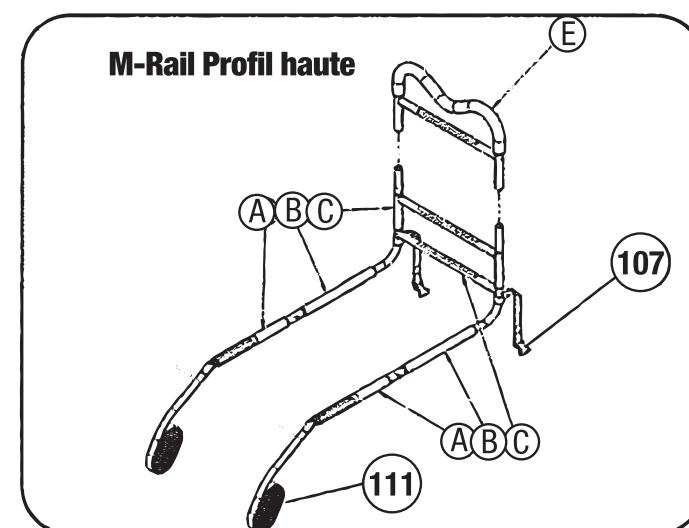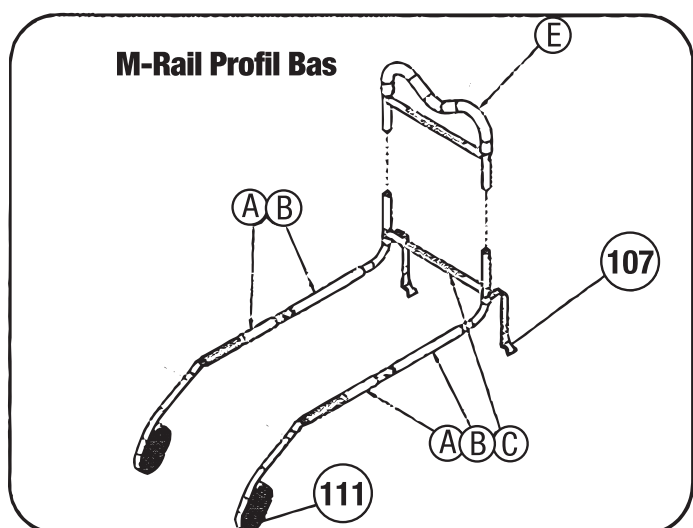

9. Faites passer la longue sangle (pièce 111) à travers le cadre de base du lit et au-dessous jusqu'au M-Rail.
10. Faites passer la longue sangle (pièce 111) par la boucle (pièce 107) jusqu'à la longueur désirée. Fermez la boucle (pièce 107) pour sécuriser la courroie.
11. Remettez le matelas sur le lit si vous l'aviez enlevé.
12. Étendez-vous sur le lit et positionnez le M-Rail à l'endroit qui vous est le plus confortable.
13. Serrez les deux sangles-courroies contre la base ou le cadre du lit, Assurant que celles-ci soient droites et parallèles.
14. Bouclez et rebouclez le bout de la sangle (pièce part 111) directement au-dessous de la boucle (pièce 107). Coupez l'excès de la longue sangle (pièce 111) pour empêcher les dangers de trébucher.

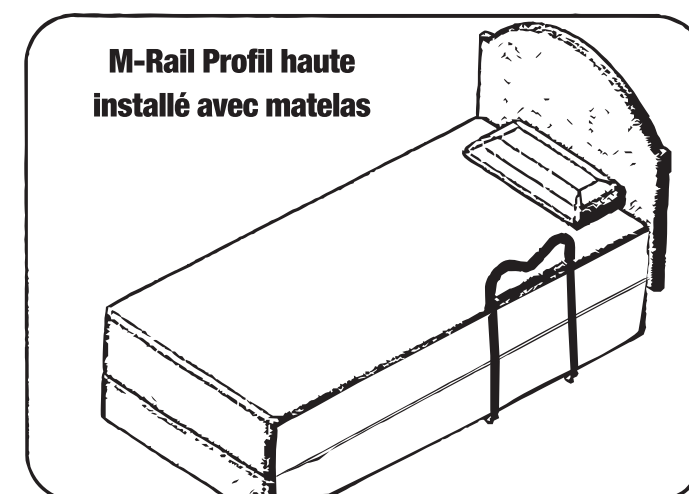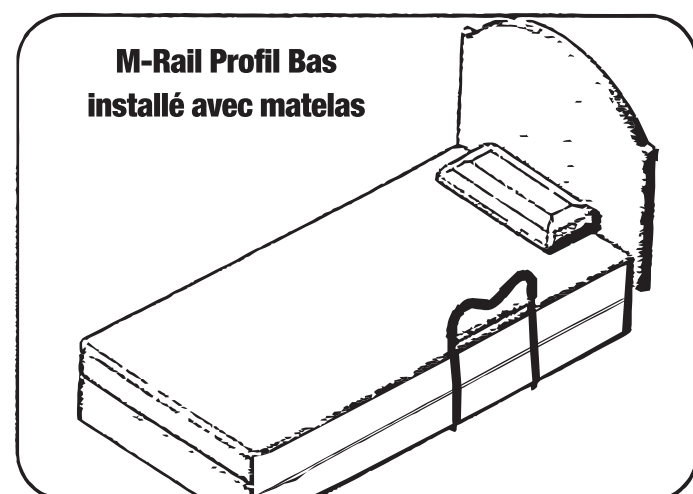

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

MISE EN GARDE/AVERTISSEMENT: LE CÔTÉ DU MATELAS DOIT TOUJOURS ÊTRE APPUYÉ CONTRE CES BARRES HORIZONTALES ET VERTICALES, SANS AUCUN ESPACEMENT. NE PAS ENLEVER CES BARRES TRANSVERSALES. Ne placez pas les membres du corps entre ou sous les barreaux. N'enlevez pas la barre transversale du produit. Cette appareil n'est pas conçu pour accepter le poids total du corps de la personne—les lits étroits peuvent basculer si le poids total du corps est appliqué. Pour les utilisateurs pesant jusqu'à 300 lbs (135 kg).



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine